

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS HÁROMRÉTEGŰ SZÁJMASZK SZŰRŐOSZTÁLYÚ PORMASZKOKHOZ

AZ EK / EU TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTÓ FÜGGETLEN MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME:

ICR Polska/CE/V/10R753

Plac Pryzmierza 6, 03-944 Warsaw


Cikkszám: D381802



GB 32610-2016

EN14683:2019+AC:2019

Felhelyezés:

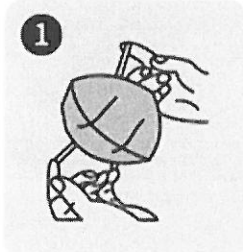

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### POR ELLENI MASZK - FÉL-MASZK POR ELLENI SZŰRÉSRE

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és a használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az EN 14683:2019+AC:2019-es szabványnak.

A megfelelőségi nyilatkozatokért forduljon az forgalmazóhoz: info@rikovinn.hu

Ez a maszk szűrési hatékonysága és a maximális átengedési rátaszerint van kiértékelve.

A maszk kiválasztását a szennyeződés típusának, koncentrációjának (cf; biztonsági lap) és a belföldi szabályozás által előírt Megadott Védelmi mutató (FPA) függvényében kell elvégezni. További információval az EN529 szabvány szolgál (ajánlások a választáshoz, a használat hoz, a ~~karbantartás~~).

Három szűrőosztály létezik: **FFP1 / FFP2 / FFP3** (lásd a dobozon és a maszkon lévő jelet).

**FFP1:** A specifikus toxicitás nélküli szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk.

A szűrőréteg szűrőképessége: 80%.

Teljes beszívárgás <22%. Megadott Védelmi mutató (FPA): 4. Felhasználási példák: Kő/törmelék/cellulózkezelése.

**FFP2:** Közepes toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk.

A szűrőréteg szűrőképessége: 94%.

Teljes beszívárgás <8%. Megadott Védelmi mutató (FPA): 10.

Felhasználási példák: Lágyműanyagok csiszolásához, összetett anyagok, rozsdá, gitt, gipsz, műanyag / kivágások, leköszörülés, fémlukasztás.

**FFP3:** Magas toxicitású szilárd és cseppfolyós részecskék elleni maszk.

A szűrőréteg szűrőképessége: 99%.

Teljes beszívárgás <2%. Megadott Védelmi mutató (FPA): 20.

Felhasználási példák: Kemény fák csiszolásához (bükk, tölgy) / a fák réz, króm vagy arzén alapú felületek kezelése, / csiszolás, festés / ce- ment csiszolás.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Nyissa szét a maszkot. (Előtte alaposan mosson kezet)
2. Helyezze a maszk nyitott oldalát az arca elé, hogy tökéletesen takarja az állat, a száját és az orrát is.
3. Rögzítse a maszkot a rugalmas gumipánttal a fül mögött
4. Minkét kezével állítsa be a merevített részt az orrnyergen, amíg a maszk jól nem illeszkedik.
5. Ellenőrizzük az illeszkedést/ szigetelést úgy, hogy erőteljesen

kilégezünk és ellenőrizzük, hogy a maszk karimája mellett semmiféle légáramlás nincs. Illeszkedési probléma esetén újra állítás és újra ellenőrzés.

A maszk egy munkanapnál hosszabb ideig nem használható. Eza maszkcsakegyszerhasználandó (karbantartásnincslehetőség).

Kizárólag felhasználás előtt szedjük ki csomagjából a maszkot. Csak akkor használható, ha a szennyeződés koncentrációja nem jelent közvetlen veszélyt az életre vagy az egészségre, és kizárólag az egészségi és biztonsági szempontokból alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően. Bármilyen felhasználás előtt, ellenőrizzük azt, hogy érintetlensége, szavatossági ideje (gyártási idő a csomagoláson) és védő osztálya (FFP1/FFP2/FFP3) megfelel a használati módnak (anyag és koncentráció).

### HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK:

Ne használjuk felhasználási területén kívül, ahogyan ez a jelenlegi oldalakon meg van szabva. Az érzékeny személyek bőrén allergiát válthat ki. Ebben az esetben hagyjuk el a veszélyes területet, vegyük le a maszkot és keressünk fel egy orvost.


### FIGYELMEZTETÉS:

A felhasználónak megfelelő képzésben kell részesülnie a maszk helyes viseléséről és tudnia kell a felhasználási utasításban foglaltakról használat előtt. A maszkot jól levegőztetett, megfelelő oxigén-ellátottságú (>19.5%), robbanékony anyagoktól mentes helyeken használjuk. Az elvárt védelmi szint eléréséhez a maszkot a helyes pozícióba kell helyezni. Ne használjuk, ha az arcon található szőrzet (szakáll, haj) megakadályozza a maszk illeszkedését / szigetelését és beszívárgás tapasztalható. Hagyjuk el azonnal a helyiséget, ha a légzés nehezzé válik és/vagy rosszul érezzük, szédülést tapasztalunk. A maszkon átalakítást, javítást végezni tilos, dobjuk el, ha meghibásodott. A maszk NEM NYÚJT VÉDELMEZT használatjának a gázok, gőzök és a spray változatú festő oldószerek ellen. Ezen felhasználási utasítások be nem tartása ártalmasnak bizonyulhat a felhasználó egészségére nézve, és ezzel a felhasználó az életét kockáztathatja.

### TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Ha nem használja, szállítsa az eredeti csomagolásban.

Tárolás: Száraz, nedvességtől és fénytől védett helyen, az eredeti csomagolásában (-10°C/+50°C - HR<80%).

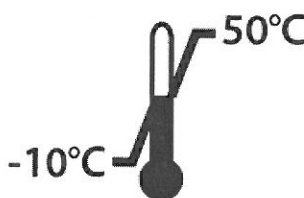

0-80% RH

Felhasználhatósági idő a megjelölt körülmények betartása mellett a gyártástól számított 5 év. A tájékoztatót kérjük minden dobozhoz hozzátenni!